

ULTRA SAFETY PLUS

ULTRA SAFETY PLUS



Шприцы
Ultra Safety Plus
Система для предотвращения повреждения и возможного инфицирования использованной иглой. Стерильный одноразовый шприц с иглой, со съёмной рукояткой многократного использования, с пассивной и активной аспирацией.



ULTRA SAFETY PLUS



ULTRA SAFETY PLUS

ULTRA SAFETY PLUS

- **Характеристика:** шприц одноразового использования
- **Преимущество:** снижен риск перекрестного загрязнения. Наличие системы блокировки
- **Характеристика:** усовершенствованная система блокирования
- **Преимущество:** защита стоматолога и персонала от повреждения

- **Характеристика:** индикатор среза иглы
- **Преимущество:** иглу можно ввести в ткани без боязни поломки

- **Характеристика:** возможность повторной установки картриджа
- **Преимущество:** если необходимо вводить разные анестетики.

- **Характеристика:** снабжен иглой, внешний диаметр которой соответствует стандарту, а внутренний диаметр шире чем у обычной иглы (Ultra Safety Plus XL)
- **Преимущество:** при инъекции необходимо меньше давления для введения того же количества анестетика, что в результате позволяет контролировать процесс введения анестетика и позволяет избежать повреждений тканей, снизить риск поломки иглы

- **Характеристика:** уникальный защитный футляр
- **Преимущество:** защита защищает стоматолога и персонал от повреждения иглой

- **Характеристика:** повышенная прозрачность цилиндра
- **Преимущество:** виден процесс аспирации
- **Характеристика:** пассивная и активная аспирация
- **Преимущество:** безопасно для пациента



Генеральный дистрибьютор: ООО "Компания КРИСТАЛЛ"
65055 г.Одесса, ул. Дорожная, 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Характеристика: четко определенная позиция блокировки А
- Преимущество: защита пациента и персонала во время «перезагрузки» шприца

- Характеристика: не отражает свет и теплый на ощупь
- Преимущество: не страшно для детей и нервных пациентов



- Характеристика: присоединение рукоятки к шприцу
- Преимущество: при правильной сборке необходимо приложить небольшое давление для того, чтобы разобрать систему
- Характеристика: рукоятка присоединена к защитному цилиндру
- Преимущество: руки в перчатке или влажные не будут скользить

тел.: 0 800 505 8 500*; 0(482) 333 005 факс: 0 (48) 777 33 37

www.kristall-odessa.com e-mail: info@kristall-odessa.com

*Звонки бесплатные со всех стационарных телефонов в Украине





ULTRA SAFETY PLUS

ULTRA SAFETY PLUS



1 Откройте упаковку и выньте стерильную систему из блистера. Плотнo удерживая стержень рукой, полностью установите картридж с анестетиком с открытой стороны.




2 Удерживайте поршень, поставив палец в кольцо для пальца. Введите кончик рукоятки в мембрану картриджа с анестетиком.




3 Затем, продвиньте защитный корпус в противоположном направлении до тех пор, пока не услышите щелчок, это означает, что корпус плотно сел на рукоятку.

Внимание: Если у вас не получится полностью сдвинуть корпус до того как вы услышите щелчок, то это может привести к демонтажу устройства во время работы.

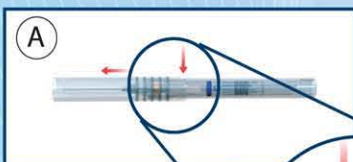

5 При использовании одного картриджа.

Внимание: Во время процедур, которые требуют нескольких инъекций при использовании одного картриджа, врач может спокойно оставить тот же самый шприц для дальнейшего использования, необходимо просто заново надеть защитный колпачок на иглу. Если вам понадобится поменять картридж,

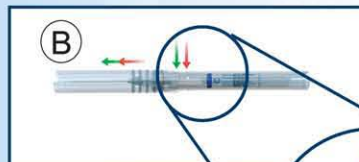

следуйте описанию, начиная с шага 7 и далее. После того как процедура завершена, в целях безопасности снова наденьте защитный колпачок и установите его в позицию «закрыть» (B), которая находится во второй выемке на конце корпуса. Таким образом, игла надёжно зафиксирована внутри корпуса.




6 После использования снимите поршень. После того как инъекционная система приведена в состояние «закрыть» (B), удерживая всю систему одной рукой, другой рукой полностью вытяните поршень. После этого одним движением выдерните рукоятку. Сейчас вы можете выбросить использованный картридж и автоклавировать рукоятку.



Генеральный дистрибьютор: ООО "Компания КРИСТАЛЛ"
65055 г.Одесса, ул. Дорожная, 25

КАК

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

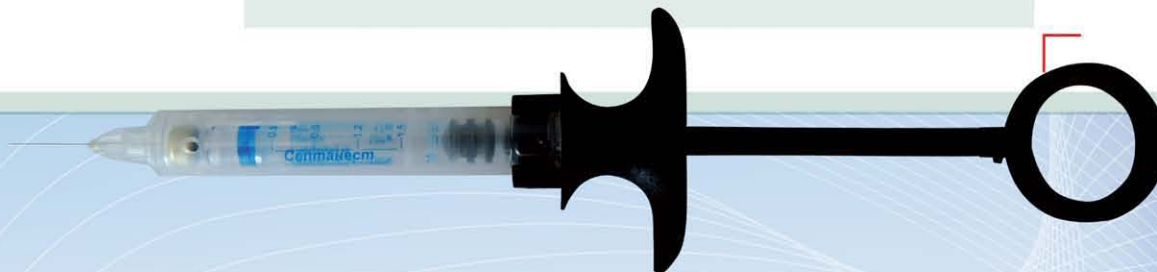

4
Далее, все манипуляции производятся, не касаясь иглы. Снимите защитный колпачок с иглы. Система готова к использованию.

Пассивная аспирация.


У основания цилиндра инъекционной системы есть небольшой выступ. Он выглядит, как капля клея.

Когда начинается введение, мембрана прижимается к выступу, таким образом, происходит разрезание. Когда давление прекращается, мембрана отходит от выступа, что приводит к аспирации.

Активная аспирация.

Она производится, когда врач максимально оттягивает поршень, установив палец в

кольцо. Благодаря вакууму, который создается из-за резиновой насадки поршня, происходит втягивание пробки, обеспечивая, тем самым активную аспирацию. Такая активная аспирация хорошо видна, когда минимальное количество анестетика в шприце вытесняется из картриджа.

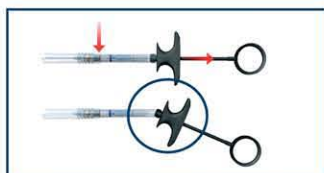

7
Установка второго картриджа.

Внимание:

Во время процедур, требующих более одного картриджа, приведите корпус в позицию «удержание» (А), это поможет избежать непроизвольного повреждения иглой.

Если вдруг инъекционная система внезапно заблокирована в позиции «закрыть» (В), ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разблокировать её, используйте новую инъекционную систему.

Удерживайте корпус одной рукой, а другой рукой полностью вытяните поршень. После этого одним движением выдерните рукоятку.

8
Удерживайте рукоятку-поршень и оттягивайте назад. Затем, введите кончик поршня в пустой картридж, который находится внутри инъекционной системы. Вытащите картридж, который присоединён к поршню посредством силиконового наконечника, снимите его с поршня и выбросьте его. Сейчас вы подготовили систему для установки нового картриджа. Начините процедуру с шага 1.

тел.: 0 800 505 8 500*; 0(482) 333 005 факс: 0 (48) 777 33 37

www.kristall-odessa.com e-mail: info@kristall-odessa.com

*Звонки бесплатные со всех стационарных телефонов в Украине





АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ



Рукоятка для многократного использования из поликарбоната рассчитана на 100 систем одноразового использования. Эта рукоятка не отражает свет, теплая на ощупь, и специально разработана как для активной, так и для пассивной аспирации. Предназначена для автоклавирования и может быть приобретена отдельно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Убедитесь, что система присоединена к рукоятке. Это можно сделать плавно сдвинув его до тех пор, пока вы не услышите щелчок, это будет говорить о том, что футляр плотно сел на место.
2. Перед инъекцией снимите колпачок с иглы.

Внимание: колпачок для одноразового использования.

3. Не перекручивайте и не сгибайте иглу перед инъекцией.
4. Если непреднамеренно, всё же так случилось, то незамедлительно снимите систему и начните процесс установки заново. Не пытайтесь усилием снять защитный футляр.
5. После окончания процедуры введения анестетика, установите защитный футляр в позицию В и начните демонтаж картриджа как описано выше. Выбросите картридж от системы в контейнер для стекла, а инъекционную систему - в контейнер для острых отходов. Сейчас рукоятка готова к автоклавированию.
6. Всегда выбрасывайте загрязнённую заблокированную инъекционную систему в контейнер для острых отходов.
7. Выбирайте подходящий контейнер для острых отходов объёмом не менее 6 литров.
8. Всегда располагайте контейнер для острых отходов в непосредственной близости от места работы.

ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ РУКОЯТКИ.

Внимание: очищайте и стерилизуйте рукоятку перед первым использованием, а также после каждого пациента:

- удалите все остатки крови и слюны с рукоятки;
- продезинфицируйте рукоятку 70% этиловым спиртом;
- простерилизуйте рукоятку в автоклаве в течение 20 минут при температуре 134°C и храните



ULTRA SAFETY PLUS



Тип анестезии

Подслизистая анестезия зоны сосочка	Перапикальная по вестибулярной поверхности. Верхняя и нижняя челюсти	Перапикальная по небной стороне. Верхняя челюсть	Перапикальная по язычной стороне. Нижняя челюсть.	Внутрисосудистая и внутривенная анестезия.	Интралигаментарная.	Внутрипульпарная.	Региональная анестезия. Переднеальвиолярная. Блокада нерва.
-------------------------------------	--	--	---	--	---------------------	-------------------	---

Типы игл

● 30 g экстракороткая 0,30 x 12 мм ●●●	●	●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
30 g короткая 0,30 x 16 мм ●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●
30 g короткая 0,30 x 10 мм	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
30 g короткая 0,30 x 23 мм		●●	●●	●			●●
30 g короткая 0,30 x 25 мм		●●	●●			●	●●
● 27 g экстракороткая 0,40 x 8 мм ●	●			●●●●●●			
27 g короткая 0,40 x 16 мм	●●	●●	●	●	●		●●
27 g короткая 0,40 x 21 мм	●●	●●	●			●	●●
27 g короткая 0,40 x 25 мм	●	●	●			●	●●
27 g короткая 0,40 x 32 мм	●	●					●●
● 27 g длинная 0,40 x 35мм							●●

●●● Рекомендовано

●● Подходит

● Допустимо



тел.: 0 800 505 8 500*; 0(482) 333 005 факс: 0 (48) 777 33 37

www.kristall-odessa.com e-mail: info@kristall-odessa.com

*Звонки бесплатные со всех стационарных телефонов в Украине





ULTRA SAFETY PLUS

**Генеральный дистрибьютор
ООО „Компания КРИСТАЛЛ”**



**Главный офис и аптечный склад
г. Одесса, ул. Дорожная, 25**

тел.: 0(48) 784 77 55

факс: 0(48) 777 33 37

info@kristall-odessa.com

Аптека №1

г. Киев

ул. Хмельницкая 10,

тел.: 0 (44) 492 15 63

факс: 0 (44) 492 15 64

kiev@kristall-odessa.com

Аптека №2

г. Харьков

ул. Командарма Корка, 10

тел./факс.: 0 (57) 716 69 40

kharkov@kristall-odessa.com

Аптека №3

г. Львов

ул. Кос-Анатольского, 4

тел./ факс.: 0 (32) 240 59 55

lviv@kristall-odessa.com

Аптека №4

г. Днепропетровск

пр. Кирова, 64

тел.: 0 (56) 374 54 97

факс: 0 (56) 371 76 83

dnep@kristall-odessa.com

Аптека №5

г. Донецк

ул. Воровского, 9

тел.: 0 (62) 266 13 02

факс: 0 (62) 387 55 91

donetck@kristall-odessa.com

**www.kristall-odessa.com
www.septanest.com.ua**